

遊歩フジ 航空機への積載について



お客様へ

- 航空機に搭乗される場合は、「ハンドル形電動車いす」をご利用されていることを事前に航空会社に連絡して、航空会社の指示に従ってください。
- 航空会社から、寸法（縦・横・高さ）、重量、バッテリーの種類等について確認を求められますので、取扱説明書をお手元に準備してお話してください。

簡易諸元

寸法（全長、全幅、全高）	1,195 × 650 × 1,100 (mm)
重量（バッテリー含む）	101kg
バッテリー（5時間率）	種類 ; HC38-12A / SER38-12 （＊防漏形鉛蓄電池） 電圧 ; 12V 容量 ; 32Ah 使用個数 ; 2個

＊バッテリーには“VRLA”または“Valve Regulated Lead-Acid Battery”の表示があり、防漏形鉛蓄電池を意味します。

- 航空機に搭乗される場合は、遊歩フジは「お預け手荷物」の扱いとなり、貨物室に積載されます。
- ご不明な点がある場合は、販売店にお問い合わせください。



注意

- 改造やオプション装着により寸法や重量が変更されている場合は、変更後の数値が必要です。
- 弊社純正バッテリー以外のバッテリーに交換した場合は、バッテリーメーカーや交換依頼先などにおたずねください。



航空会社の方へ

- 電動車いす 遊歩フジ の積載にあたっては、次頁以降の要領にて作業をお願いいたします。

ご参考

> [国土交通省ホームページ「機内持込・お預け手荷物における危険物について」](#)

バッテリー確認方法


①電源スイッチを切りにしてキーを抜き取ります。




②シートを開けて収納ボックスを取外します。



③12mmnのスパナ等を使用しステーを取り外します。

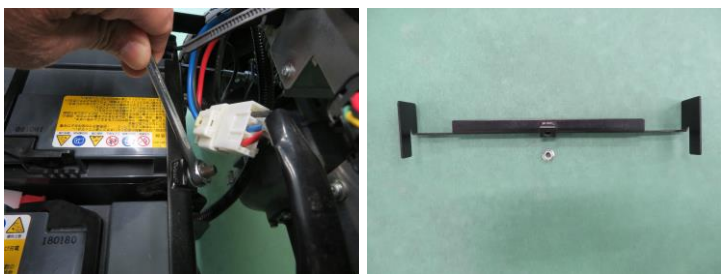

④10mmnのスパナ等を使用し後側のボルト（2個）を取り外します。

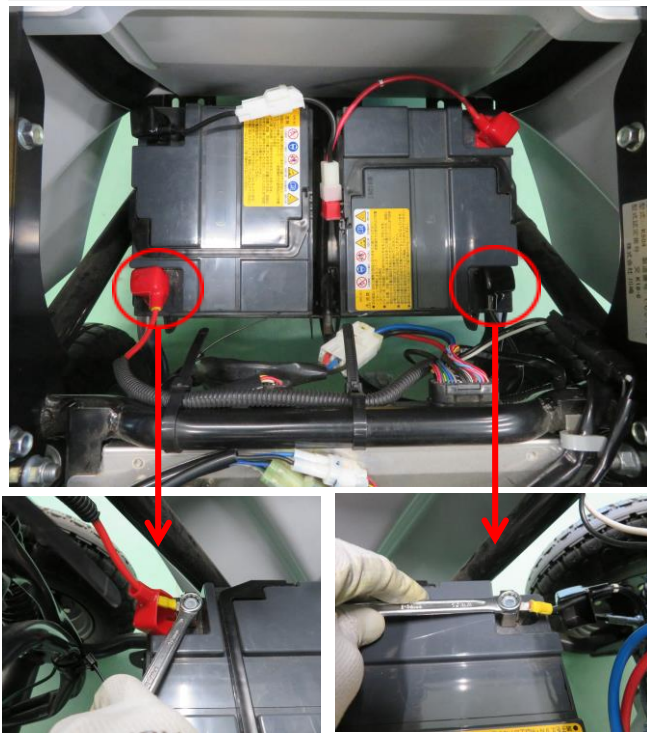

⑤前側バッテリーケーブルのコネクターを抜き、バッテリーを上引き抜き確認します。



日立製 HC38-12バッテリーは防漏型です。

⑥逆の手順でバッテリーとバッテリーカバーを元に戻します。付け忘れ、締め忘れにご注意ください。

誤作動防止のキー付き電源スイッチの確認方法と操作方法



ハンドル中心にある電源スイッチを「切り」にしてキーを抜き取ります。

バッテリー確認方法


①電源スイッチを切りにしてキーを抜き取ります。



②シートを開けて収納ボックスを取外します。



③+ドライバーを使用しバッテリーカバーを取外します。

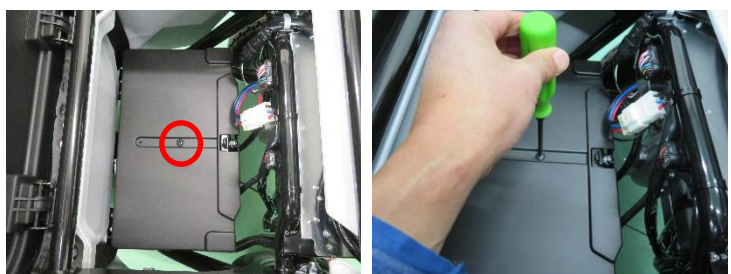

④12mmのスパナ等を使用しステーを取り外します。



⑤10mmのスパナ等を使用し後側のボルト（2個）を取り外します。



⑥前側バッテリーケーブルのコネクターを抜き、バッテリーを上引き抜き確認します。



GSユアサ製 SER38-12バッテリーは防漏型です。

⑦逆の手順でバッテリーとバッテリーカバーを元に戻します。付け忘れ、締め忘れにご注意ください。

誤作動防止のキー付き電源スイッチの確認方法と操作方法



ハンドル中心にある電源スイッチを「切り」にしてキーを抜き取ります。